




InstruSan

صابون و منظف و مطهر للأدوات الجراحية
(مرحلة ما قبل التطهير العالي المستوى)



عبوة ال 1 لتر (1000 مل) تنتج 50 لتر محلول جاهز للاستخدام حسب مكان الاستخدام

التركيزات المناسبة لكل استخدام

مكان الاستخدام	كمية السائل المركز كمية الماء	نوع المياه	قوة المحلول و ملاحظته	الوقت المستغرق للتطهير	المسح أو الغسل بالماء بعد الاستخدام
مرحلة غسل الأدوات وإزالة الدماء و سوائل الجسم	20 مل (مركز) لكل 980 مل ماء ينتج = 1 لتر من المحلول الجاهز للاستخدام لتحضير عدد معين (س) من لترات المحلول الجاهز للاستخدام: س 20 X مل (مركز) + س 980 X مل (ماء)	مياه الشرب (البانقا) 	محلول جاهز للاستخدام بقوة 2% فاعلية المحلول المخفف يتم التخلص من الكمية المحضرة بنهاية الدوام أو عند تغير قوام المحلول	من: 5 دقائق - 15 دقائق	غسل الأدوات جيداً بالماء و إزالة بقايا المحلول تماماً ثم التجفيف جيداً

